

SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test


Roche



Schritt-für-Schritt-Anleitung

!?

Warum machen wir Selbsttests?

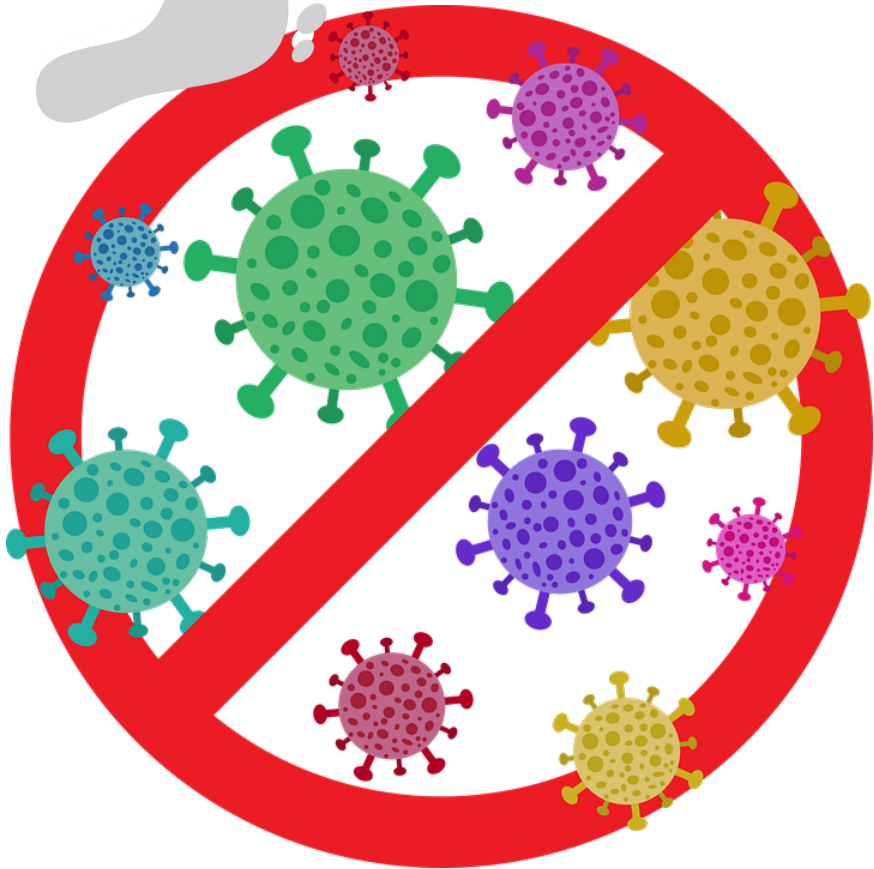

- Sicherheit in der Schule erhöhen
- Infektionsketten durchbrechen

1 Hände waschen oder desinfizieren

Testraum/
Klassenzimmer
gut **LÜFTEN!**

AHA
+L




2

Vorbereitung der Teststation durch die Schülerinnen und Schüler

steriler Tupfer (Teststäbchen)




Testkassette

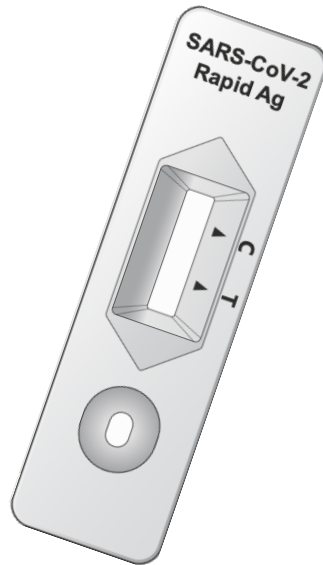

Kappe



Teströhrchen

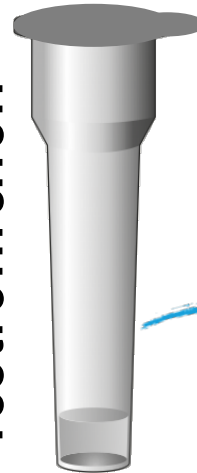

Plastik-
beutel




Wäscheklammer



3

Klebeverschluss am Teströhrchen abziehen


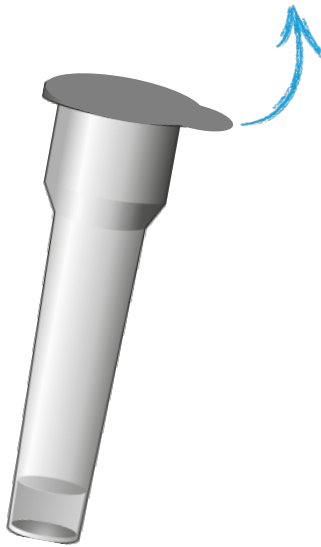


Teströhrchen mit der
Wäscheklammer gerade
auf den Tisch stellen

4

Teststäbchen aus der Verpackung nehmen


Tupfer nicht
berühren!

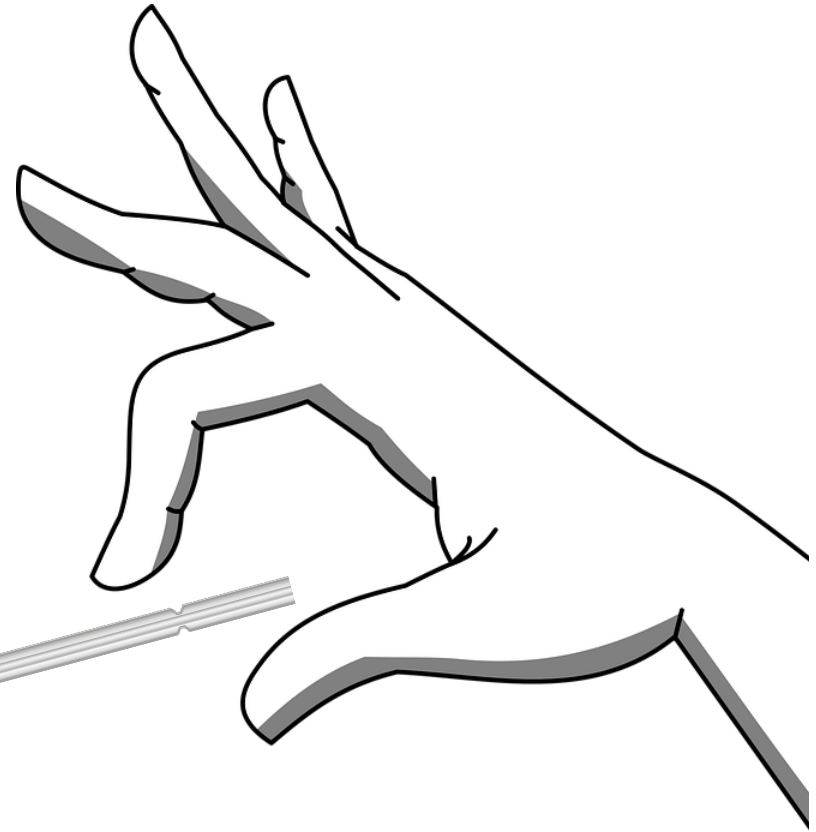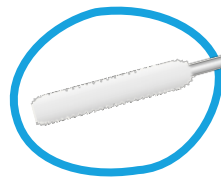




Abstrich in **BEIDEN** Nasenlöchern

4-mal drehen

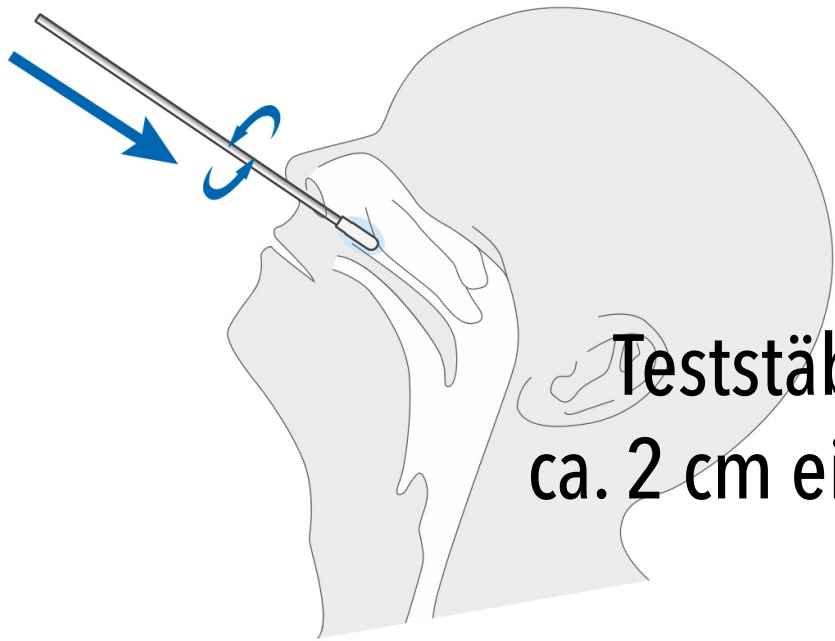


4-mal drehen

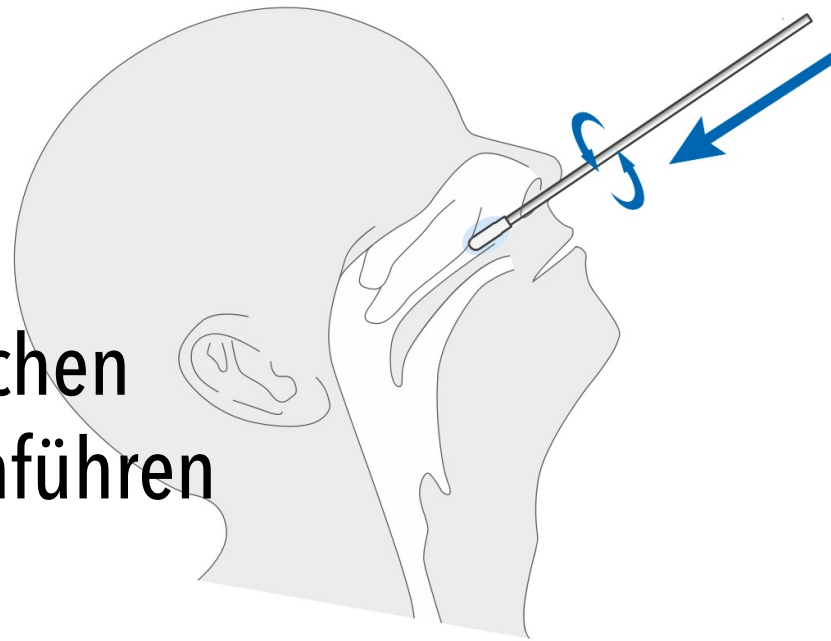

Teststäbchen
ca. 2 cm einführen


6

Teststäbchen in die Pufferlösung geben

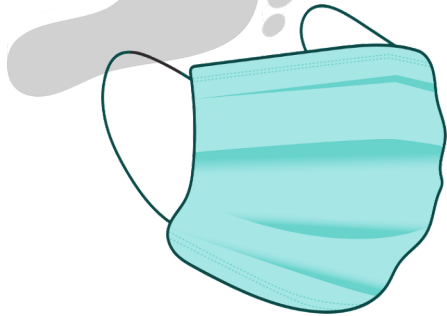


Maske wieder aufsetzen!

- Teststäbchen mindestens 10-mal drehen
- DABEI: Röhrchen IMMER leicht zusammendrücken, auch beim Rausziehen

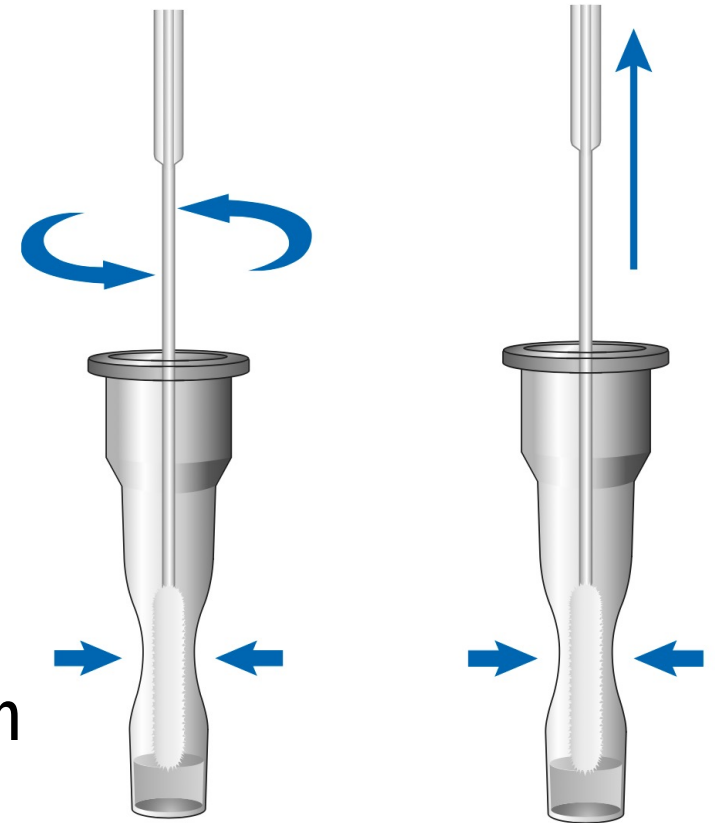


8

Teststäbchen „entsorgen“

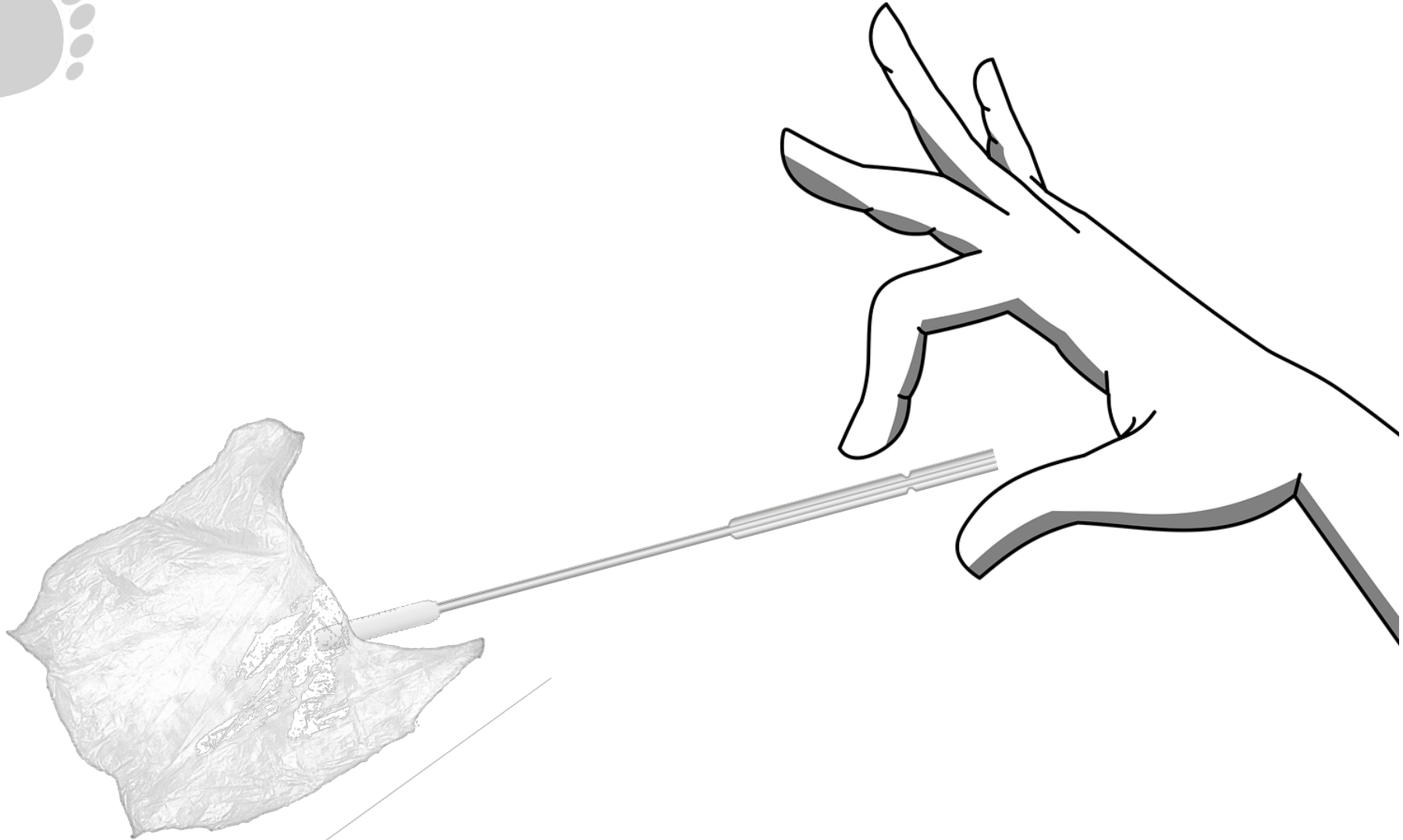




Röhrchen mit der Kappe verschließen

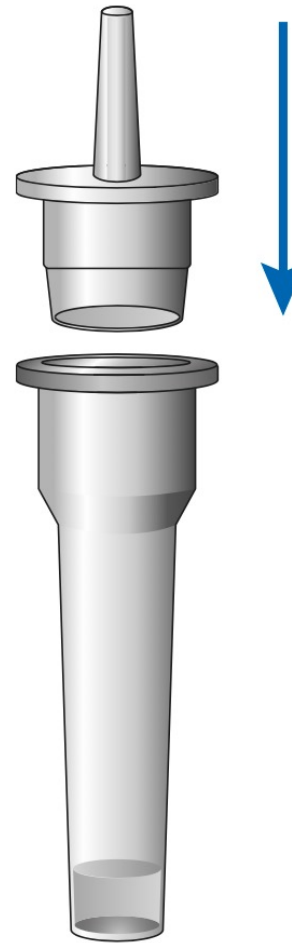





4 Tropfen in die runde Vertiefung der Testkassette geben

4 Tropfen

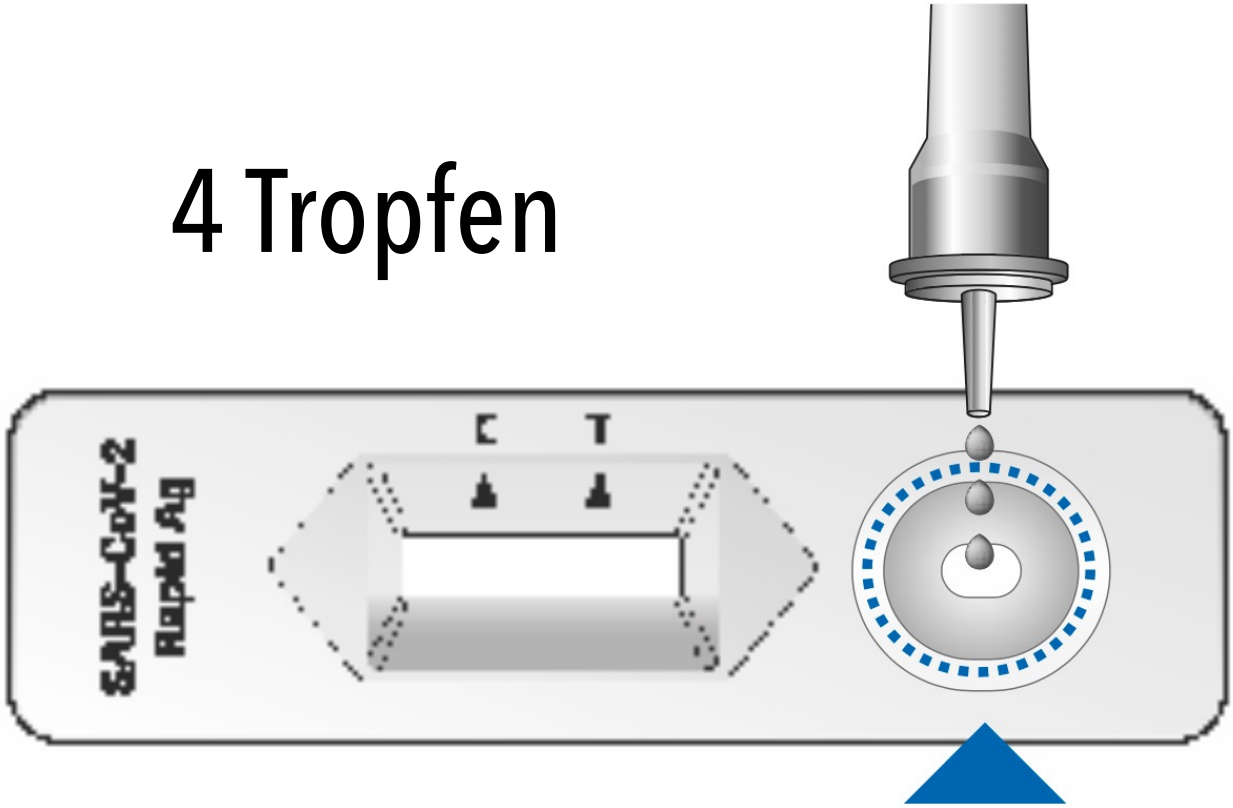

11


15 bis 30 Minuten warten

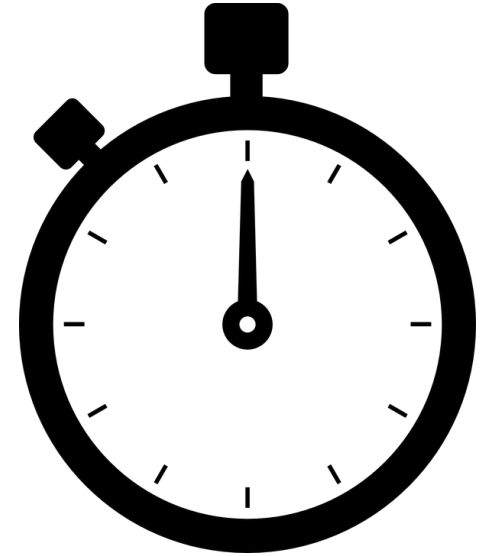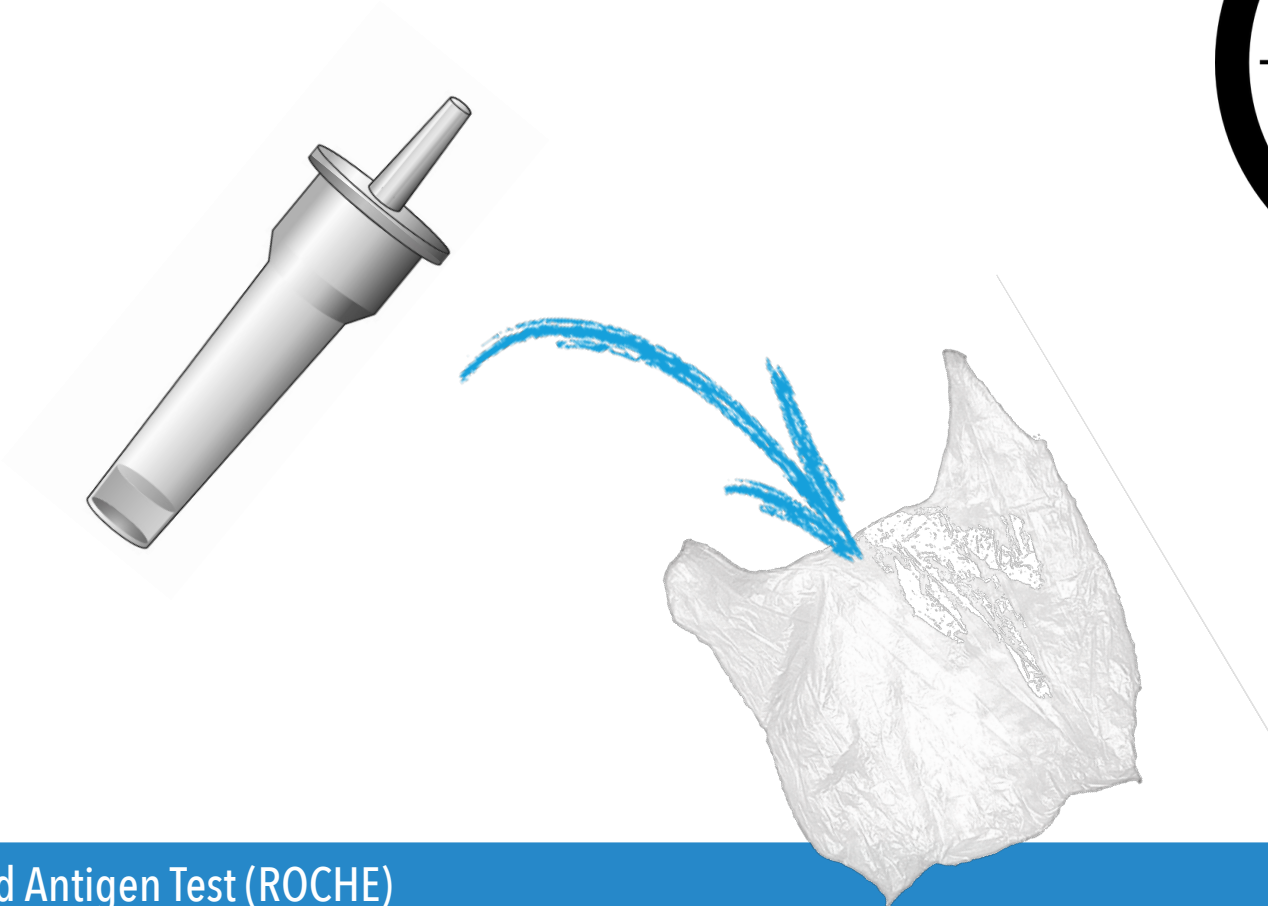




Testergebnis ablesen

UNGÜLTIG

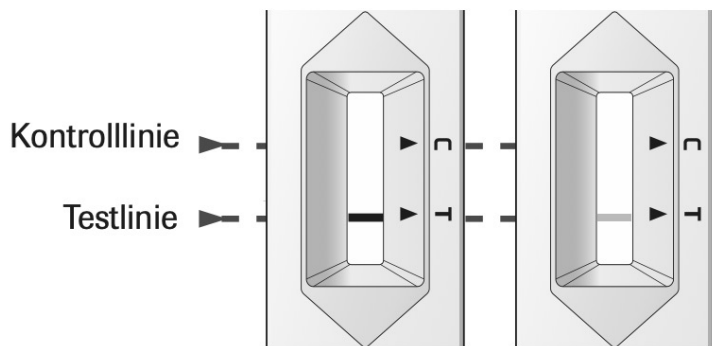


Test wiederholen

POSITIV



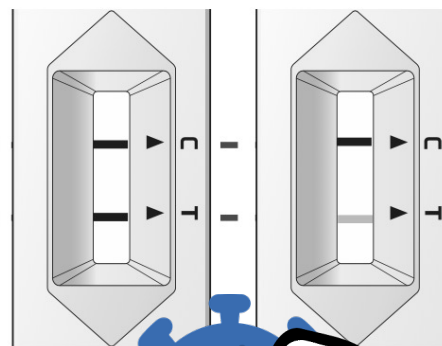


NEGATIV

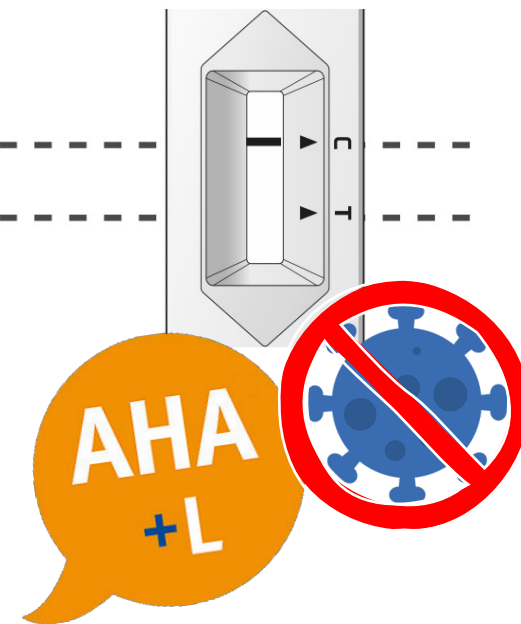



13

Test komplett entsorgen

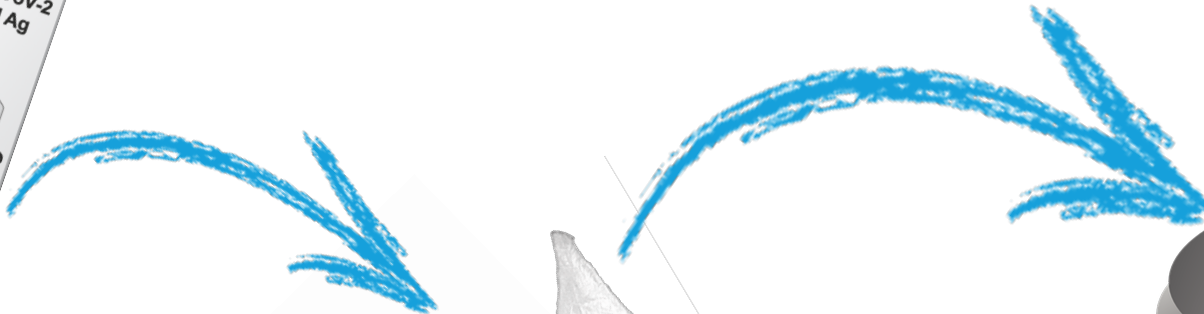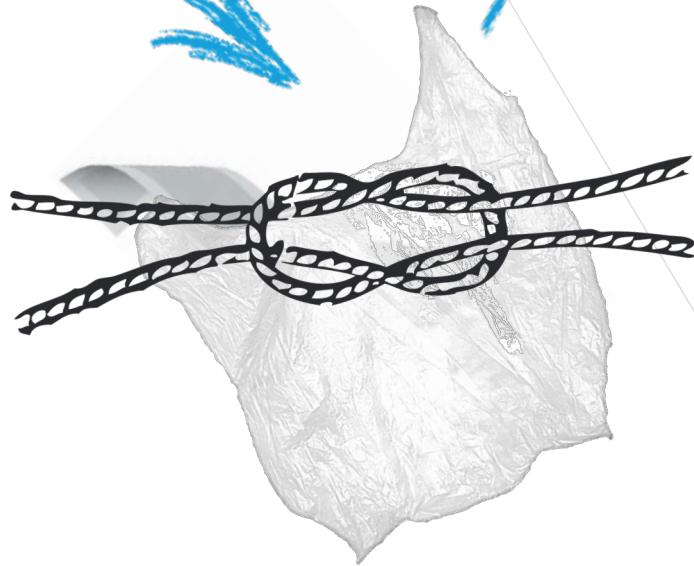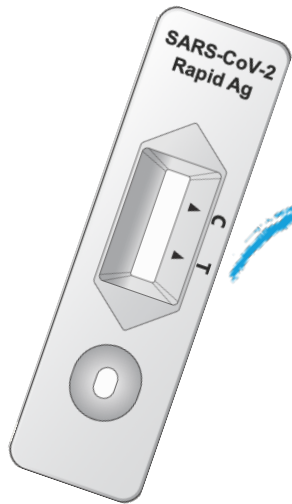

14

Hände waschen oder desinfizieren

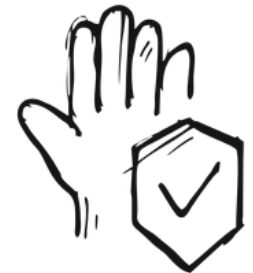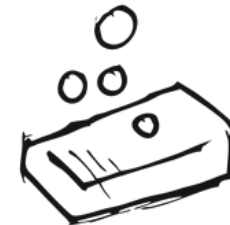




Schnelltest positiv!?



POSITIV

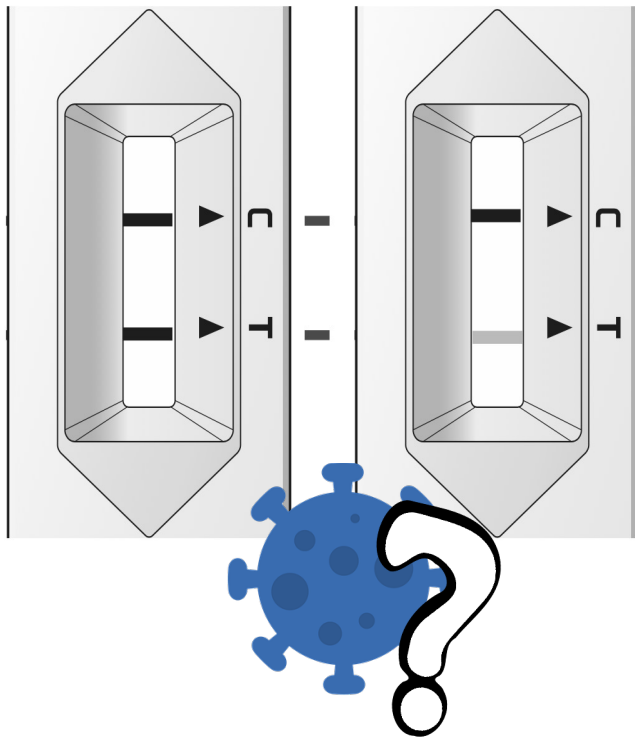

- Testraum/Klassenzimmer verlassen
- Eltern/Erziehungsberechtigte anrufen
- in einem isolierten Bereich warten
- sich abholen lassen (keine öffentlichen Verkehrsmittel benutzen!)
- Gesundheitsamt informieren
- PCR-Test machen, um das Ergebnis des Schnelltests zu überprüfen



Quellen

Informationen des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus: <https://km.bayern.de/selbsttest>

https://assets.cwp.roche.com/f/94122/x/61a34d3132/gebrauchsanweisung_layoutanpassung_dina4_sars-cov-2_200103.pdf

Bildquellen: Kurzanleitung ROCHE und <https://pixabay.com/de/>

https://www.bgbau.de/fileadmin/_processed_/b/7/csm_0013245_8a0cb_d6622.jpg